

器具の一次処理方法について

処理方法	器具の種類	使用薬剤と使用方法	消毒液の希釈方法・注意事項
洗淨のみで良いもの (汚染が著明な場合は、消毒も行う)	個人専用の水のみ・薬杯 ガーグルベースン 経管栄養ボトル 膿盆 体温計・体温計ケース 便器 尿器 採尿カップ 喉頭鏡ハンドル	洗淨後、流水でよくすすぎ乾燥させる。 体温計は消毒用アルコールでの清拭でもよい。 ※喉頭鏡ハンドルはクリアパワーで清拭する。	※器材洗淨時は、手袋・マスク・エプロン・ゴーグルを装着して取り扱う
消毒が必要なもの	薬杯 水のみ マウスピース 超音波ネブライザー用マスク 超音波ネブライザー薬液槽	【次亜塩素酸ナトリウム】 0.01~0.0125%次亜塩素酸ナトリウム液に、1時間浸漬	ミルクポン 100ml+水 8L ※ふた付き容器を使用すること ※浸漬前には、必ず十分な洗淨を行う ※浸漬する際は、器材が消毒液から浮かないように注意すること
	哺乳瓶 乳首	栄養科で洗淨・熱処理	
	聴診器	消毒用アルコールで清拭	
	消化管内視鏡 気管支鏡	【過酢酸製剤（アセサイド）】又は、【フタラール製剤（DISOPA）】 自動洗淨消毒機	
	喉頭内視鏡 軟性膀胱鏡	【過酢酸製剤（アセサイド）】 自動洗淨機専用	
	経食道心エコープローブ	DISOPAによる浸漬消毒	
	クベース	【第四級アンモニウム塩】 クリアパワーで清拭	
滅菌が必要なもの	摂子 尖刀類 スタイレット マギール鉗子 手術器具 分娩器具 内視鏡関連物品（生検かん子等） 喉頭鏡ブレード（電球式は、電球を外して提出する）	【病棟・外来】 使用器材を専用容器に入れ、予備洗淨スプレー（パワークイック）をスプレーし、中央滅菌材料室へ搬送する。 【中央滅菌材料室】 ウォッシャーディスインフェクタ（自動洗淨機）で洗淨後、滅菌する。	
	硬性内視鏡	中央滅菌材料室にて、ウォッシャーディスインフェクターで洗淨後、プラズマ滅菌もしくは酸化エチレンガス滅菌	

